

Dentegris CAD/CAM-Aufbauten

Arbeitsablauf Praxis

Planung/Fertigung über Modellversand

Seite 1 von 1

Indikationsbereiche:

- Einzelzahnversorgungen
- Kleine Brücken

Materialauswahl der individuellen Aufbauten:

- Frontzahnbereich: Titan oder Zirkon auf Titanklebebasis CerTis
- Seitenzahnbereich: Titan

-
- 1) Abformung ausschließlich mit neuen Abdruckpfosten vornehmen (offene oder geschlossene Abformung. Bei geschlossener Abformung ausschließlich Dentegris AGP-Abdruckpfosten verwenden!)
 - 2) Zur Kontrolle der exakten Passung zwischen Abdruckpfosten und Implantat, empfehlen wir eine Röntgenkontrollaufnahme!
 - 3) Abformung
 - 4) Abformung des Gegenbisses
 - 5) Erstellung eines Bissregistrats aus Silikon
 - 6) Oben genannte Unterlagen ins Labor schicken
 - 7) Ca. 2 Tage später: Erhalt eines Konstruktionsvorschlags durch Dentegris Fräszentrum via E-Mail
 - 8) Fertigungsfreigabe / Rückantwort via E-Mail durch das Dentallabor oder den Zahnarzt.

Bitte planen Sie bis zum Erhalt der Aufbauten 5 Arbeitstage ein!

- 9) Einsetzen der individuellen Aufbauten im Mund.
- 10) Anziehen der Aufbauschraube mit 35 Ncm.
- 11) Bei Einsetzen der endgültigen prothetische Versorgung muss der/die PatientIn vorab, unter Zuhilfenahme einer Watterolle, für 3-5 Min. Kaubewegungen und -belastungen auf den indiv. Aufbau durchführen.
- 12) Nachziehen der Aufbauschraube mit abermals 35 Ncm!
- 13) Einsetzen der prothetischen Versorgung.

Alternative: Planung individueller Aufbauten über Datentransfer.

Für die Anwender einer auf 3Shape oder Exocad basierten Planungssoftware bieten wir die Fertigung individueller Abutments per Datentransfer Ihrer selbst erstellten Planungsdaten an.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage <http://dentegris.de/index.php?id=67> .

- Stand: 10.2018