



Anwenderinformationen

MCI

CAD CAM Bibliotheken



TITANKLEBEBASEN MIT UND OHNE ROTATIONSSICHERUNG

MCI bietet seine CerTis-Klebebasen mit einer standard Kaminhöhe von 4,5mm an. Sie können zwischen den Varianten mit und ohne Rotationssicherung wählen. Beide Varianten haben eine Gingivahöhe von 0,3mm. In der Exocad Bibliothek können Sie diese Klebebasen unter folgenden Einträgen finden:

Bibliotheksteile	Option	Ref. der Klebebasis
MCI - CerTis- Abutments	330CerTis	330CerTis
	3841CerTis	3841CerTis
	450CerTis	450CerTis
	450CerTis	450CerTis
MCI - CerTisOH Abutments without rotation lock	330CerTisOH	330CerTisOH
	3841CerTisOH	3841CerTisOH
	450CerTisOH	450CerTisOH
	450CerTisOH	450CerTisOH

Optionsschema Beispiel:

Implantat
Ø 3,8 / 4,1mm “ohne Hex”
↓ ↓
3841CerTisOH

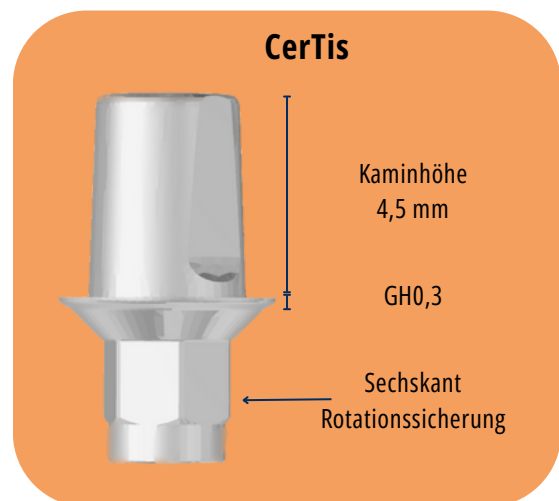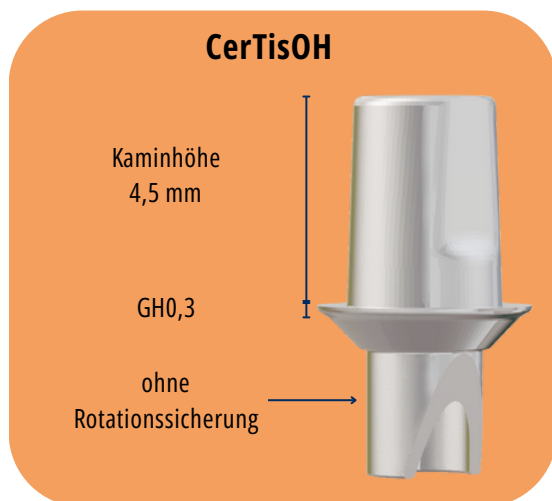


Hinweis: Die Fräsgeometrien von CerTis und CerTisOH sind untereinander nicht kompatibel. D.h. Zirkonaufbauten, die mit dem Bibliothekseintrag für CerTis Titanbasen konstruiert wurden können nicht mit CerTisOH Titanbasen verwendet werden.

TITANKLEBEBASEN - LANG


Neben den standard CerTis-Klebebasen bietet MCI auch lange Klebebasen mit einer Kaminhöhe von 6,5mm an. Sie können zwischen den Varianten mit und ohne Rotationssicherung wählen. Beide Varianten sind in 1mm schritten einkürzbar bis zu einer Kaminhöhe von 3,5mm.

Bibliotheksteile	Option	Ref. der Klebebasis
MCI - CerTis-L 2. Generation	3,3 GH0,3/6,5	330CerTis-L
	3,3 GH0,3/5,5	
	3,3 GH0,3/4,5	
	3,3 GH0,3/3,5	
	3,8/4,1 GH0,3/6,5	3841CerTis-L
	3,8/4,1 GH0,3/5,5	
	3,8/4,1 GH0,3/4,5	
	3,8/4,1 GH0,3/3,5	
	4,5 GH0,3/6,5	450CerTis-L
	4,5 GH0,3/5,5	
	4,5 GH0,3/4,5	
	4,5 GH0,3/3,5	
	5,5 GH0,3/6,5	550CerTis-L
	5,5 GH0,3/5,5	
	5,5 GH0,3/4,5	
	5,5 GH0,3/3,5	
MCI - CerTis-LOH 2. Generation	3,3 GH0,3/6,5	330CerTis-LoH
	3,3 GH0,3/5,5	
	3,3 GH0,3/4,5	
	3,3 GH0,3/3,5	
	3,8/4,1 GH0,3/6,5	3841CerTis-LoH
	3,8/4,1 GH0,3/5,5	
	3,8/4,1 GH0,3/4,5	
	3,8/4,1 GH0,3/3,5	
	4,5 GH0,3/6,5	450CerTis-LoH
	4,5 GH0,3/5,5	
	4,5 GH0,3/4,5	
	4,5 GH0,3/3,5	
	5,5 GH0,3/6,5	550CerTis-LoH
	5,5 GH0,3/5,5	
	5,5 GH0,3/4,5	
	5,5 GH0,3/3,5	

Optionsschema Beispiel:

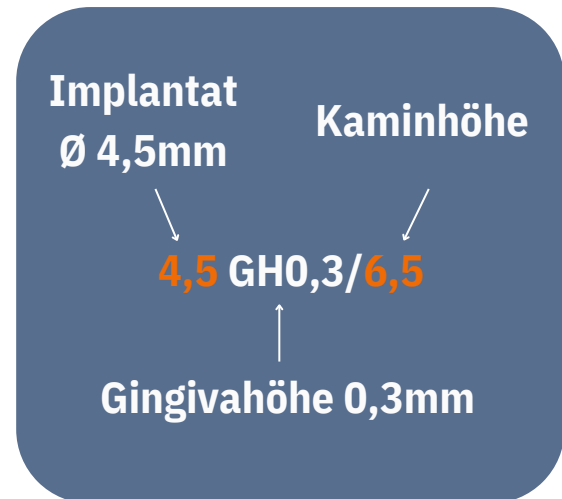

Kaminhöhen:

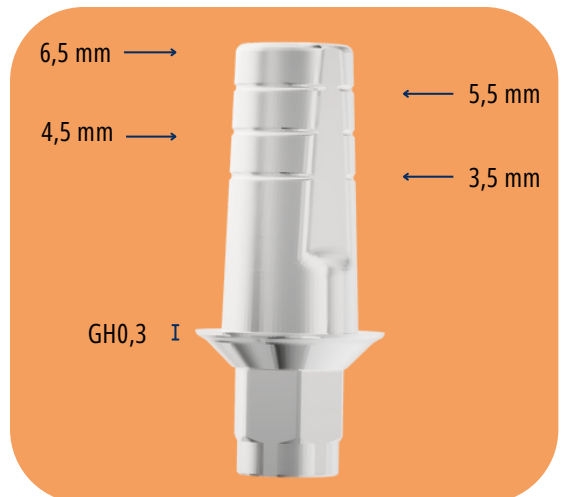


Hinweis: Die Fräsgeometrien von CerTis-L und CerTis-LoH sind untereinander kompatibel. D.h. Zirkonaufbauten, die mit dem Bibliothekseintrag für CerTis-L Titanbasen konstruiert wurden können auch mit CerTis-LoH Titanbasen verwendet werden.

TITANKLEBEBASEN - FÜR ANGULIERTE SCHRAUBENKANÄLE


Für Konstruktionen bei denen die Angulation des Schraubenkanals nötig ist, bietet MCI jetzt Klebebasen mit geöffneten Kamin an. Dies macht eine Abwinklung bis 30° möglich. Auch bei dieser Lösung können Sie zwischen den Varianten mit und ohne Rotationssicherung wählen. Beide Varianten sind in 1mm schritten einkürzbar von 6,5mm bis 3,5mm Kaminhöhe.

Bibliotheksteile	Option	Ref. der Klebebasis
MCI - TiBa	3,3 GH0,3/6,5	330TiBa
	3,3 GH0,3/5,5	
	3,3 GH0,3/4,5	
	3,3 GH0,3/3,5	
	3,8/4,1 GH0,3/6,5	3841TiBa
	3,8/4,1 GH0,3/5,5	
	3,8/4,1 GH0,3/4,5	
	3,8/4,1 GH0,3/3,5	
	4,5 GH0,3/6,5	450TiBa
	4,5 GH0,3/5,5	
	4,5 GH0,3/4,5	
	4,5 GH0,3/3,5	
MCI - TiBa-oH	3,3 GH0,3/6,5	330TiBa
	3,3 GH0,3/5,5	
	3,3 GH0,3/4,5	
	3,3 GH0,3/3,5	
	3,8/4,1 GH0,3/6,5	3841TiBa
	3,8/4,1 GH0,3/5,5	
	3,8/4,1 GH0,3/4,5	
	3,8/4,1 GH0,3/3,5	
	4,5 GH0,3/6,5	450TiBa
	4,5 GH0,3/5,5	
	4,5 GH0,3/4,5	
	4,5 GH0,3/3,5	

Optionsschema Beispiel:

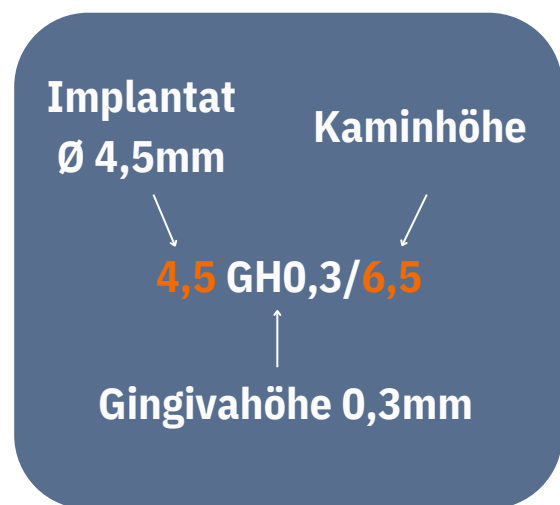

Kaminhöhen:

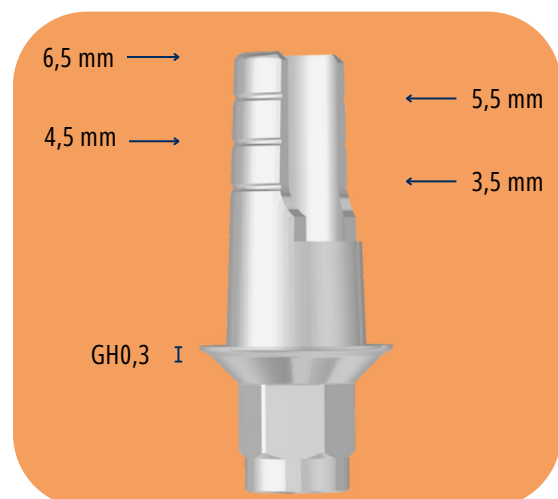

Hinweis: Die Fräsgeometrien von TiBa und TiBa-oH sind untereinander kompatibel. D.h. Zirkonaufbauten, die mit dem Bibliothekseintrag für TiBa Titanbasen konstruiert wurden können auch mit TiBa-oH Titanbasen verwendet werden.



Medical Consult Implants GmbH
Kommandanturstraße 1
47495 Rheinberg
www.mci-implants.de

