



Installationsanleitung der Dentegris Implantatbibliothek für 3shape®


- 1) Speichern Sie die Datei „3shape.zip“ an einem von Ihnen bevorzugten Ort auf Ihrem PC.
- 2) Dekomprimieren Sie die Datei „3shape.zip“. Darin finden Sie die Datei „Dentegris_v***.dme“.
- 3) Starten Sie das „Control Panel“ von 3shape.
- 4) Öffnen Sie dort das Verzeichnis „Werkzeuge / Import/Export“.

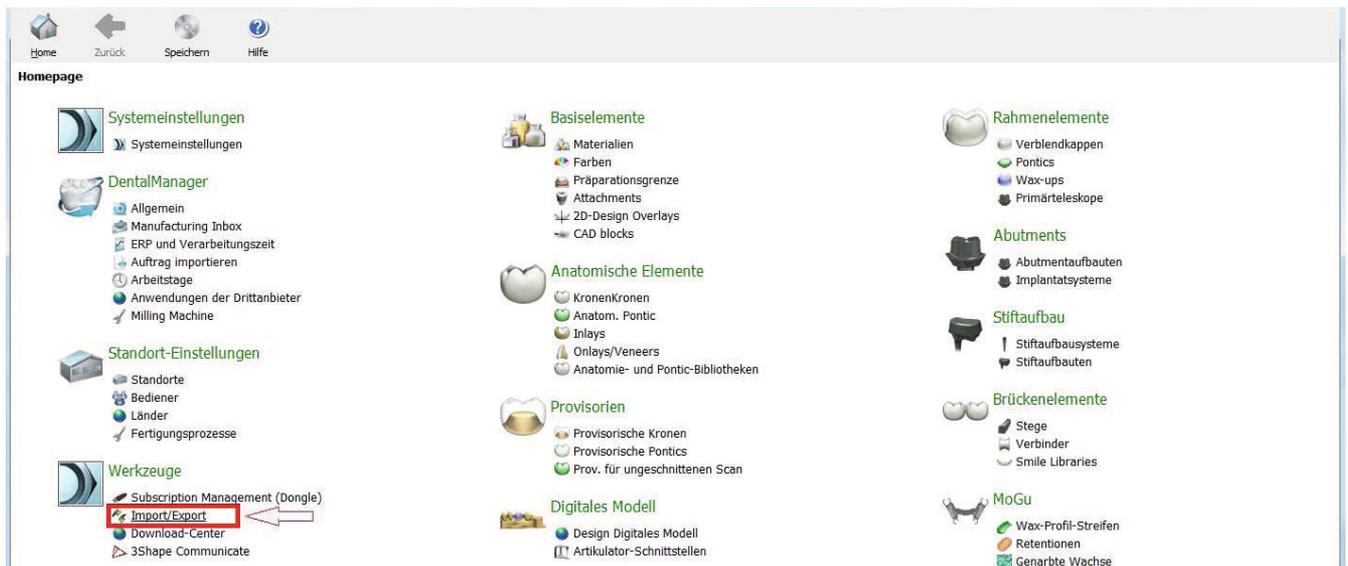

- 5) Klicken Sie auf den Button „Materialien importieren“.

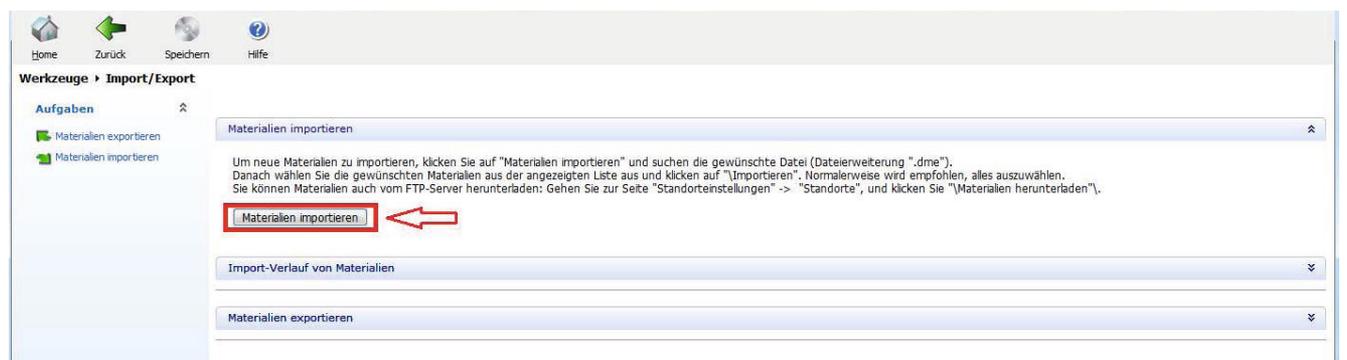


- 6) Der Explorer öffnet sich und Sie können jetzt die heruntergeladene und entpackte Datei „Dentegris_v***.dme“ importieren.

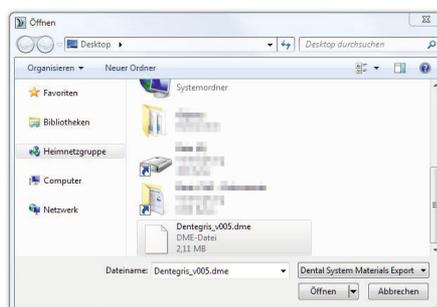


Installationsanleitung der Dentegris Implantatbibliothek für 3shape®

7) Aktivieren Sie den Button „Import“.

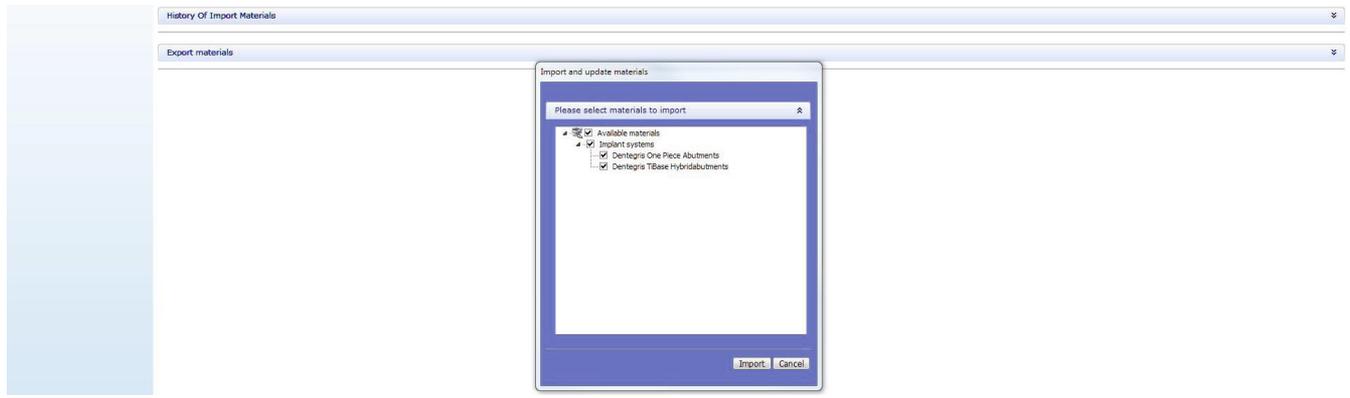

8) Bei eventueller Nachfrage zur Aktualisierung der Materialien aktivieren Sie das Häkchen und betätigen Sie den Button „Aktualisierung“.

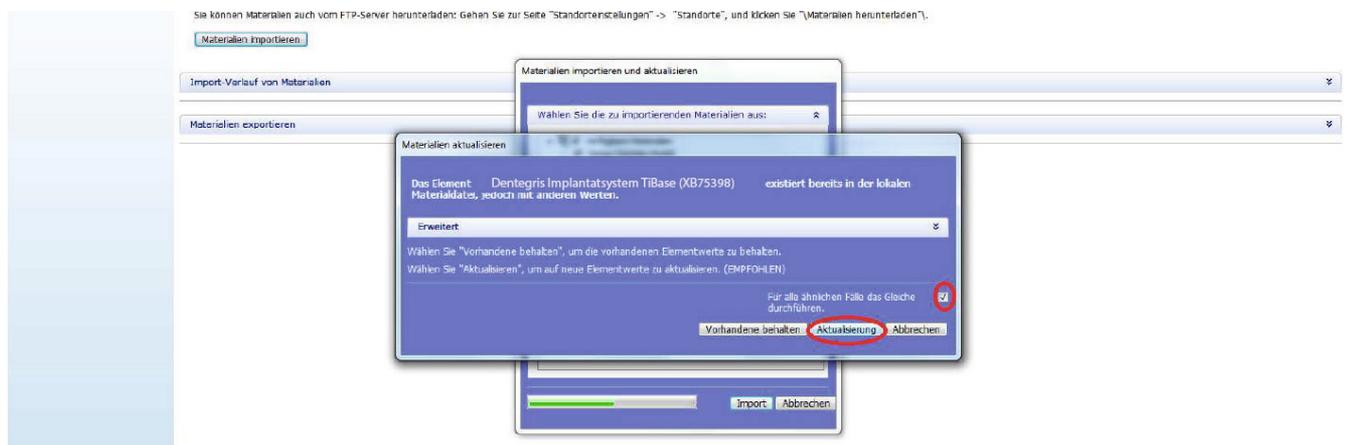

9) Nach dem erfolgreichen Import mit „OK“ bestätigen.



10) Unsere Bibliothek steht Ihnen nach dem Neustart des 3shape Dental Designers zur Verfügung. Speichern Sie bei Nachfrage die vorgenommenen Änderungen.

