

Patienteninformation

MucoMatrixX[®]

BoneProtect[®] Guide

BoneProtect[®] Membrane

BoneProtect[®] Fleece

BoneProtect[®] Cone

Distributed by Dentegris

Dentegris Service & Logistic Center

Kommandanturstraße 1 | DE-47495 Rheinberg-Orsoy | shop.dentegris.de
Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20 | www.dentegris.de

MucoMatrixX® BoneProtect® Guide / BoneProtect® Membrane BoneProtect® Fleece / BoneProtect® Cone Knochenersatzmaterial

Warum wird ein BoneProtect® Produkt/eine MucoMatrixX® benötigt?

Bei Ihnen ist ein zahnmedizinischer/oralchirurgischer Eingriff geplant, bei dem ein Gewebeersatz, eine Gewebeverstärkung oder eine Schutzhüllenfunktion notwendig ist. Zur Erzielung einer ungestörten Heilung kann es zum Beispiel notwendig sein, Knochenersatzmaterial einzubringen und dieses mit einer Membran abzudecken. Im Falle einer parodontologischen Behandlung dient eine Kollagenmembran als Barriere, die das schneller wachsende Zahnfleisch von der gereinigten Zahnwurzel abgrenzt. Auf diese Weise kann sich der langsamer einwachsende Knochen im geschützten Bereich ausweiten und gezielter integrieren. BoneProtect® Cone und BoneProtect® Fleece werden zur Blutstillung eingesetzt und unterstützen die Wundheilung.

Warum empfiehlt Ihr Zahnarzt ein BoneProtect® Produkt/eine MucoMatrixX®?

BoneProtect® Produkte, sowie die MucoMatrixX® sind Medizinprodukte aus Kollagen, die seit vielen Jahren im klinischen Einsatz sind. Das von Bio-Schweinen gewonnene Ausgangsmaterial wird mittels eines mehrstufigen Verfahrens gereinigt und zu Medizinprodukten aufbereitet. Die Ähnlichkeit zu menschlichem Gewebe gewährleistet dabei sowohl eine gute Verträglichkeit, als auch die gesteuerte Integration in das körpereigene Gewebe. So wird dem Körper ein natürliches Material zur Verfügung gestellt, das er in körpereigenes Gewebe umbauen kann.

Was passiert mit dem BoneProtect® Produkt/der MucoMatrixX® in Ihrem Körper?

BoneProtect® Produkte/MucoMatrixX® sind gewebefreundliche Materialien die auf natürliche Art und Weise vollständig in körpereigenes Gewebe umgebaut werden. Ein zusätzlicher Eingriff zur Entfernung dieser Materialien ist daher nicht erforderlich. Im Verlaufe des Heilungsprozesses werden die BoneProtect® Produkte/ MucoMatrixX® von körpereigenem Gewebe durchwachsen und fortlaufend in den natürlichen Gewebeaufbau integriert. Die Materialien werden ungefähr in folgenden Zeiträumen durch Ihr körpereigenes Gewebe ersetzt:

- BoneProtect® Fleece und BoneProtect® Cone – zwei bis vier Wochen
- BoneProtect® Guide – vier bis acht Wochen
- BoneProtect® Membrane – innerhalb von zwölf Wochen nach Implantation.
- MucoMatrixX® – sechs bis zwölf Monate

Ist das BoneProtect® Produkt/die MucoMatrixX® ein sicheres Implantationsmaterial?

Das Ausgangsmaterial wird in einem mehrstufigen Verfahren aufbereitet. Dieses Verfahren gewährleistet die Sicherheit des natürlichen Materials und erhält gleichzeitig dessen vorteilhafte Eigenschaften. Herstellung und Kontrolle erfolgen in Deutschland. Während des gesamten Prozesses unterliegt das Material strikten Qualitäts- und Sicherheitsüberwachungen.

Welche Alternativen zu BoneProtect® Produkten / MucoMatrixX® gibt es?

Alternativen zur Verwendung von BoneProtect® Produkten / MucoMatrixX® sind die Transplantation von körpereigenem Weichgewebe oder der Einsatz eines synthetisch hergestellten Materials. Daneben gibt es eine Reihe von anderen Membranen tierischen Ursprungs mit strukturell und biologisch unterschiedlichen Eigenschaften.

Erklärung:

Ich habe alles gelesen und verstanden.

Ich wurde von meinem Arzt über die Behandlung mit MucoMatrixX®, BoneProtect® Guide, BoneProtect® Membrane, BoneProtect® Fleece bzw. BoneProtect® Cone aufgeklärt.

Ich habe den Inhalt der Aufklärung gelesen und verstanden und stimme der Behandlung mit MucoMatrixX®, BoneProtect® Guide, BoneProtect® Membrane, BoneProtect® Fleece und/oder BoneProtect® Cone zu.

Ort, Datum

Unterschrift der Patientin/des Patienten